

RECOMENDACIONES PARA TRANSPORTE INTERNO, EXTERNO Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

H 06

Medidas Preventivas:

1. En la sala de extracciones coloque los tubos de las muestras en una gradilla de seguridad que sea suficiente para todos ellos. Sitúe dicha gradilla dentro de un contenedor de transporte que pueda retener fugas o derrames y asegure una protección adicional.
2. El contenedor debe tener un asa que permita el transporte de las muestras biológicas a poca distancia del suelo.
3. Seleccione la ruta de transporte que preferiblemente por la que se evite el contacto con el público, utilizando los ascensores y pasillos para uso médico.
4. Compruebe que el contenedor está identificado con la señal de peligro biológico o una etiqueta similar.



Contenedor con asa para el transporte de las muestras biológicas.



Contenedor de seguridad para transporte de muestras biológicas

Bibliografía: